


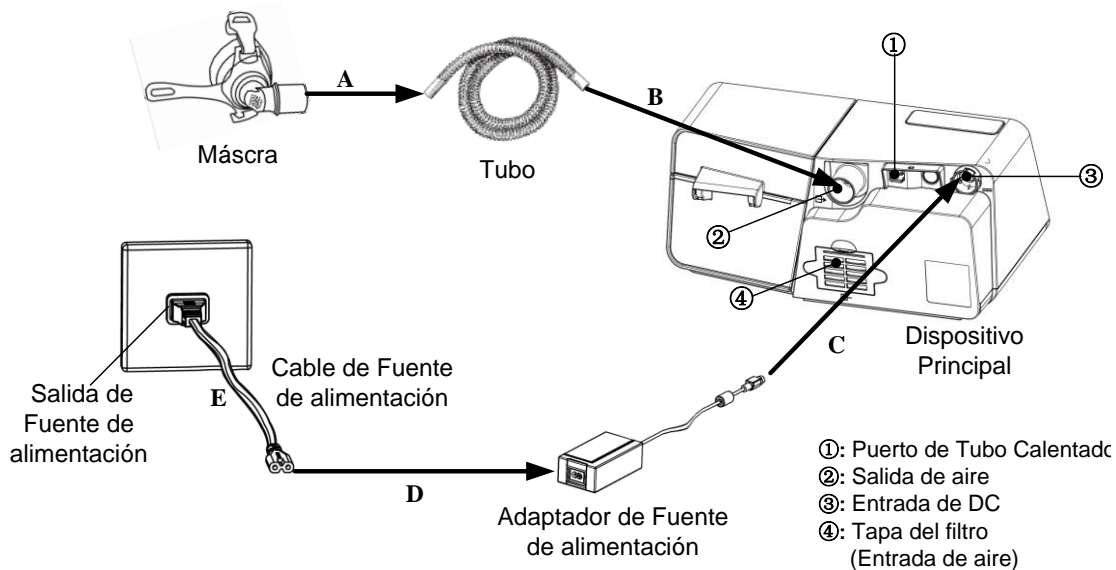


# Manual de Funcionamiento del G3 BPAP Series

## 1. Función de los Botones

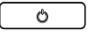
-  Botón de Hogar: Volver al menú anterior o la interfaz principal.
-  Perilla: Ajusta la configuración del dispositivo.
-  Botón de Inicio / Parada: Iniciar / detener la entrega de aire.

## 2. Configuración del Dispositivo




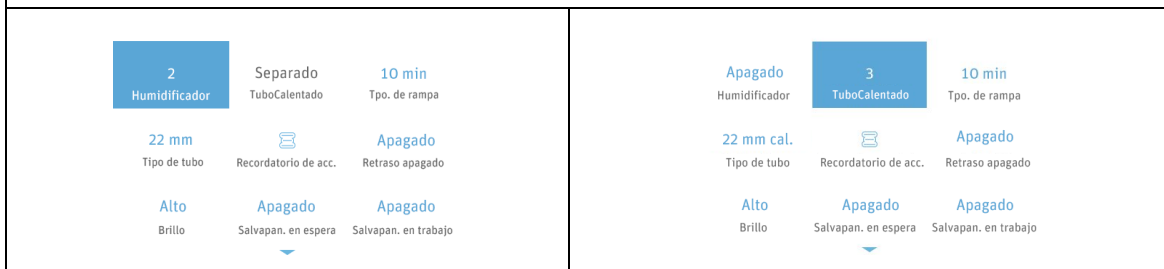
- A. Conectar un extremo del tubo a la mascarilla ya montada.
- B. Conectar el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo, tal como se muestra en la figura anterior. Conecte la unión del tubo calentado a la salida de aire del dispositivo, y luego inserte el enchufe de alimentación en el puerto del tubo calentado en la parte posterior del dispositivo.
- C. Conecte el adaptador de fuente de alimentación a la entrada DC del dispositivo principal.
- D. Conecte el cable de fuente de alimentación al adaptador de fuente de alimentación.
- E. Conecte el cable de fuente de alimentación a la toma de corriente.

## 3. Ajustar la Configuración del Dispositivo

A. Conecte el cable de alimentación y el adaptador de alimentación correctamente. La pantalla muestra la interfaz principal que se muestra en la figura a la izquierda a continuación, presione el **botón de Inicio/Parada** , y el dispositivo comenzará a suministrar aire, la pantalla muestra la interfaz principal que se muestra en la figura de abajo (aplicable a G3 B20A, G3 B25S, G3 B25A modelos) o como se muestra en la figura a continuación (aplicable a G3 B25VT, G3 B30VT, G3 B30SV, G3 LAB modelos).




B. Gire la **Perilla**  para acceder a la interfaz de configuración inicial del menú del paciente, como se muestra en la figura a la izquierda a continuación. La opción de **Tubería Calentada** solo se puede ajustar cuando el dispositivo está conectado al tubo calentado, como se muestra en la siguiente figura.




C. Presione la **Perilla**  para acceder a la Interfaz de Configuración, como se muestra en la siguiente figura.





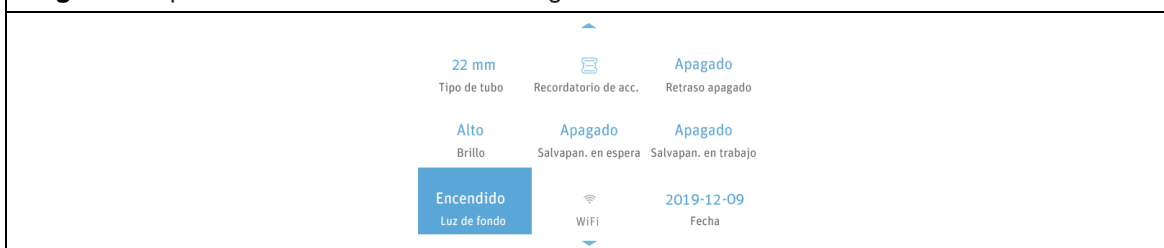
D. Gire la **Perilla**  para ajustar una opción.



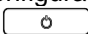
E. Presione la **Perilla**  para confirmar su ajuste a la opción.



F. El cursor cambia entre las opciones a medida que se gira la **Perilla** , como se muestra en la siguiente figura. Consulte los pasos C-E para ajustar otras opciones. Presione el **Botón de Hogar**  para salir de la Interfaz de Configuración.



#### 4. Iniciar el Tratamiento

Después de terminar de ajustar la configuración del dispositivo y volver a la Interfaz Principal, presione el **Botón de Inicio / Parada**  para iniciar el tratamiento.