

# Manual de Funcionamiento del

## G3 A20 / G3 C20


### 1. Función de los Botones



Botón de Hogar: Volver al menú anterior o la interfaz principal.




Perilla: Ajusta la configuración del dispositivo.

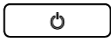


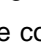
Botón de Inicio / Parada: Iniciar / detener la entrega de aire.


### 2. Configuración del Dispositivo

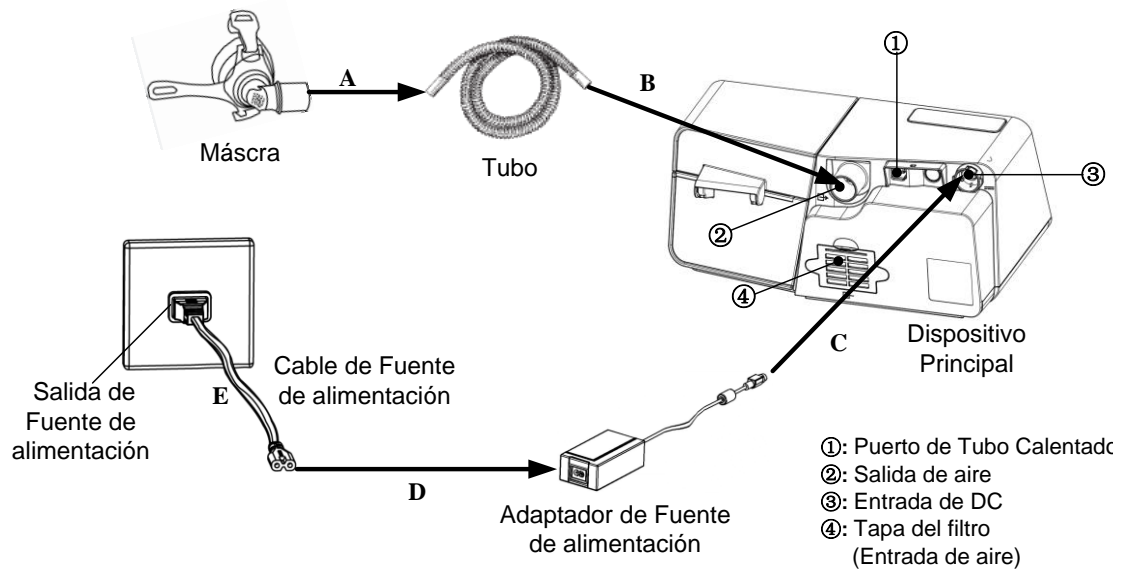


- Conectar un extremo del tubo a la mascarilla ya montada.
- Conectar el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo, tal como se muestra en la figura anterior. Conecte la unión del Tubo Calentado a la salida de aire del dispositivo, y luego inserte el enchufe de alimentación en el puerto del tubo calentado en la parte posterior del dispositivo.
- Conecte el adaptador de fuente de alimentación a la entrada DC del dispositivo principal.
- Conecte el cable de fuente de alimentación al adaptador de fuente de alimentación.
- Conecte el cable de fuente de alimentación a la toma de corriente.

### 3. Ajustar la Configuración del Dispositivo

A. Cuando se enciende el dispositivo, la pantalla mostrará la interfaz principal, como se muestra en la figura izquierda a continuación. Si el tubo calentado está conectado correctamente, el icono  se convertirá en un número  en la interfaz principal en la pantalla del dispositivo, como se muestra en la siguiente figura.

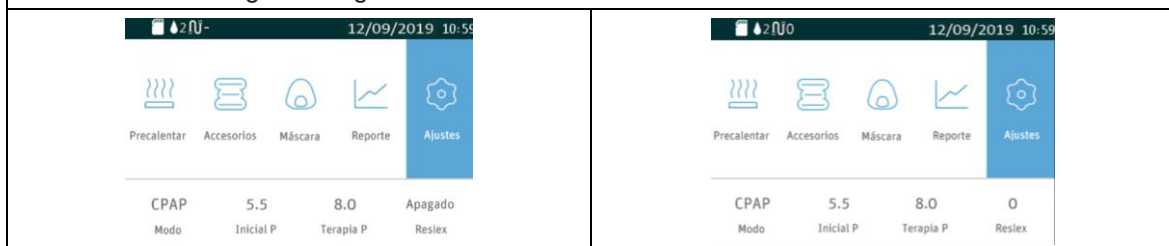

B. Presione **la Perilla**  para acceder a la Interfaz de Configuración Inicial del Menú del Paciente, como se muestra en la siguiente figura.



C. Presione **la Perilla**  para acceder a la Interfaz de Configuración, como se muestra en la siguiente figura.





D. Gire **la Perilla**  para ajustar una opción.




E. Presione **la Perilla**  para confirmar su ajuste a la opción.



F. El cursor cambia entre las opciones a medida que se gira **la Perilla** , como se muestra en la siguiente figura. Consulte los pasos C-E para ajustar otras opciones. Presione **el Botón de Hogar**  para salir de la Interfaz de Configuración.



#### 4. Iniciar el Tratamiento

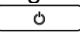Después de terminar de ajustar la configuración del dispositivo y volver a la Interfaz Principal, presione el **Botón de Inicio / Parada**  para iniciar el tratamiento.