

Manual de Funcionamiento del E-20C-H-O / E-20CJ-H-O

1. Funcionamiento



Botón de Silenciar: Presionar para silenciar la alarma




Botón de Mando: Inicia el tratamiento y ajusta la configuración del dispositivo



Botón de Rampa: Presionar para activar la función de aumento

2. Configuración del dispositivo

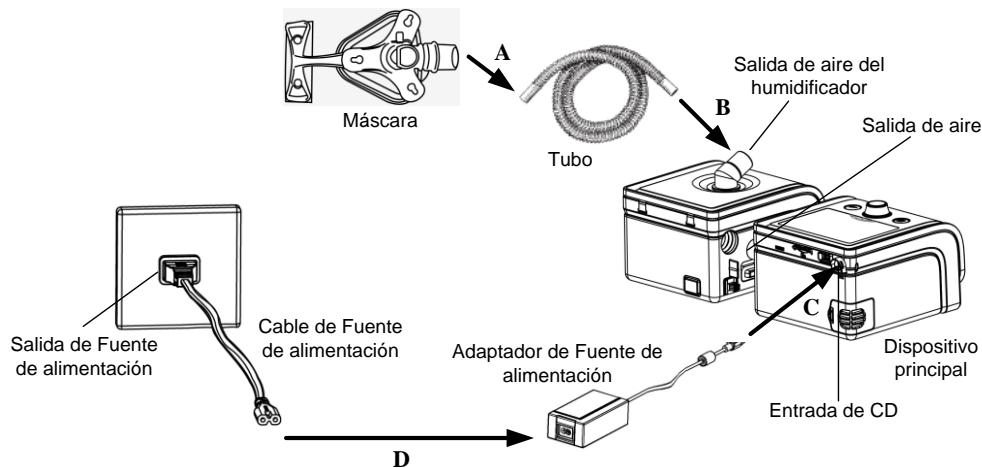

A. Conectar un extremo del tubo a la mascarilla ya montada.

B. Conectar el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo principal o del humidificador, tal como se muestra en la figura anterior.

C. Conecte el adaptador de fuente de alimentación a la entrada DC del dispositivo principal.


D. Conecte el cable de fuente de alimentación al adaptador de fuente de alimentación.

E. Conecte el cable de fuente de alimentación a la toma de corriente.


3. Ajustar la configuración del dispositivo

A. Después de que el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación, la pantalla muestra la interfaz principal que se muestra abajo en la figura de la izquierda

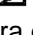

B. Desde la interfaz principal que se muestra arriba, presione y mantenga presionado el **Botón de Rampa**  durante tres segundos. La pantalla muestra la interfaz de configuración inicial, como se muestra en la siguiente figura:



C. Presione el **Botón de Mando**  para acceder a la interfaz de configuración, como se muestra en la siguiente figura:






D. Presione y gire el **Botón de Mando**  para ajustar una opción.




E. Presione el **Botón de Mando**  para confirmar su ajuste a la opción.



F. El cursor cambia entre las opciones a medida que se gira el **Botón de Mando**  Consulte los pasos C-E para ajustar otras opciones. Cuando el cursor esté sobre la opción de **Home**, como se muestra en la figura a continuación, pulse el **Botón de Mando**  para salir de la interfaz de configuración.

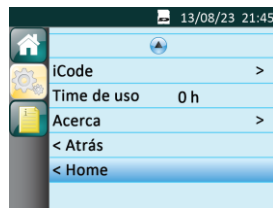

4. Iniciar el Tratamiento

Después de terminar de ajustar la configuración del dispositivo y volver a la interfaz principal, pulse el **Botón de Mando**  para iniciar el tratamiento.




5. Consejos importantes

Por favor, consulte el manual del usuario para obtener información sobre el uso del Kit de SpO₂ y de la tarjeta SD.


Antes de usar el dispositivo, lea el manual del usuario y memorice toda la información necesaria para asegurarse de usar adecuadamente el dispositivo.

Manual de Funcionamiento del E-20A-H-O / E-20AJ-H-O

1. Función de los Botones

-  Botón de Silenciar: Presionar para silenciar la alarma
-  Botón de Mando: Inicia el tratamiento y ajusta la configuración del dispositivo
-  Botón de Rampa: Presionar para activar la función de aumento


2. Configuración del Dispositivo

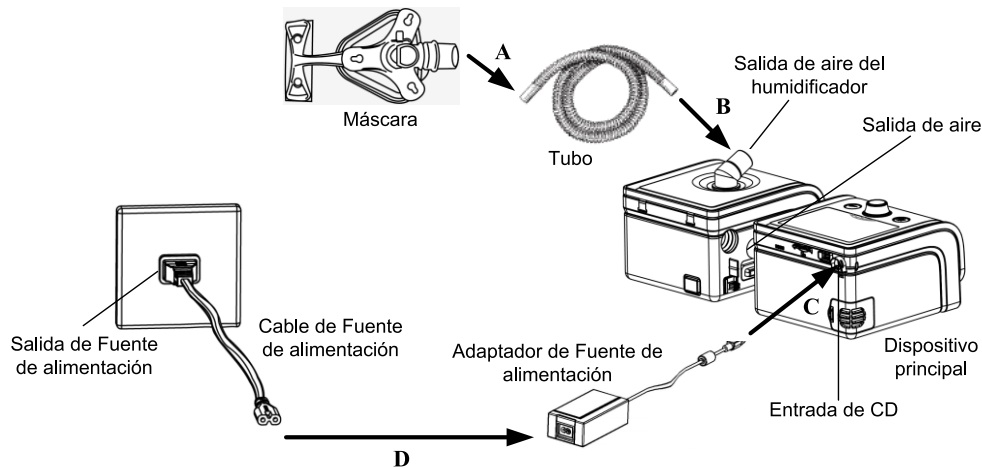


- A. Conectar un extremo del tubo a la mascarilla ya montada.
- B. Conectar el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo principal o del humidificador, tal como se muestra en la figura anterior.
- C. Conecte el adaptador de fuente de alimentación a la entrada DC del dispositivo principal.
- D. Conecte el cable de fuente de alimentación al adaptador de fuente de alimentación.
- E. Conecte el cable de fuente de alimentación a la toma de corriente.


3. Ajustar la Configuración del Dispositivo

- A. Después de que el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación, la pantalla muestra la interfaz principal que se muestra abajo en la figura de la izquierda (sólo aplica a E-20A-H-O), o a la interfaz principal mostrada abajo en la figura de la derecha (sólo aplica a E-20AJ-H-O).

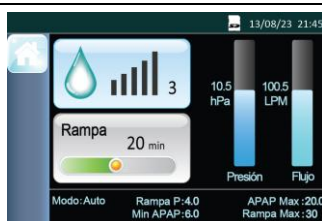

- B. Desde la interfaz principal que se muestra arriba, presione y mantenga presionado el **Botón de Rampa**  durante tres segundos. La pantalla muestra la interfaz de configuración inicial, como se muestra en la siguiente figura.



C. Presione el **Botón de Mando**  para acceder a la interfaz de configuración, como se muestra en la siguiente figura.





D. Presione y gire el **Botón de Mando**  para ajustar una opción.




E. Presione el **Botón de Mando**  para confirmar su ajuste a la opción.



F. El cursor cambia entre las opciones a medida que se gira el **Botón de Mando**  Consulte los pasos C-E para ajustar otras opciones. Cuando el cursor esté sobre la opción de inicio, como se muestra en la figura a continuación, pulse el **Botón de Mando**  para salir de la interfaz de configuración.



4. Iniciar el Tratamiento

Después de terminar de ajustar la configuración del dispositivo y volver a la interfaz principal, pulse el **Botón de Mando**  para iniciar el tratamiento.

5. Consejos Importantes

Por favor, consulte el manual del usuario para obtener información sobre el uso del Kit de SpO₂ y de la tarjeta SD.

Antes de usar el dispositivo, lea el manual del usuario y memorice toda la información necesaria para asegurarse de usar adecuadamente el dispositivo.