

Manual de Funcionamiento del Serie H-80

1. Función de los Botones



Botón de Silenciar:

Presionar para silenciar la alarma



Botón de Mando:


Inicia el tratamiento y ajusta la configuración del dispositivo



Botón Atrás:

Volver a la operación anterior

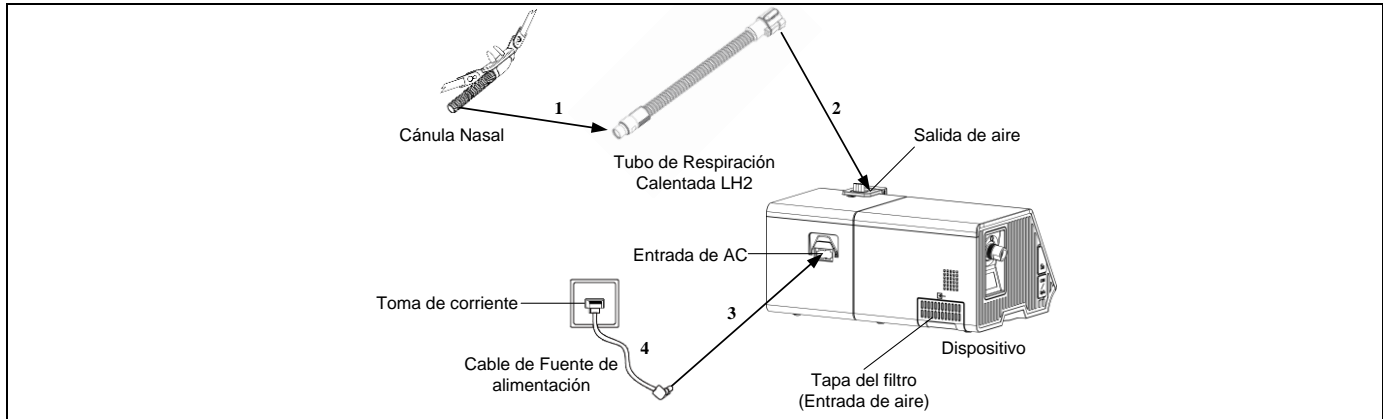


2. Configuración del Dispositivo





- A. Conecte un extremo del Tubo de Respiración Calentada LH2 a la cánula nasal ensamblada (como se muestra en la figura anterior).
- B. Conecte el otro extremo del Tubo de Respiración Calentada LH2 a la salida de aire del dispositivo (como se muestra en la figura anterior).

- C. Conecte el cable de alimentación a la entrada de AC del dispositivo principal.
 D. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente.

3. Ajustar la Configuración del Dispositivo

Conecte el cable de alimentación y el Tubo de Respiración Calentada LH2 correctamente, la pantalla muestra la Interfaz Principal que se muestra en la figura de la izquierda. Gire **el Botón de Mando**  para cambiar entre las interfaces y las opciones. Presione **el Botón de Mando**  para realizar el ajuste de los parámetros y confirmar las opciones. Después de terminar de ajustar los parámetros del dispositivo, regrese a la Interfaz Principal y presione **el Botón de Mando**  para iniciar el tratamiento.

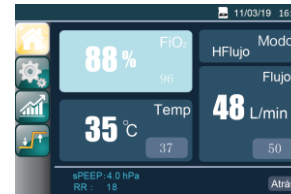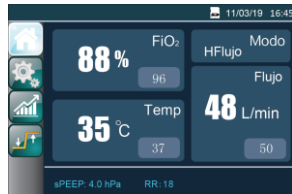

4. Nota Importante

Antes de utilizar el dispositivo, lea toda la información del manual de usuario y memorice la información relacionada con el funcionamiento correcto.