


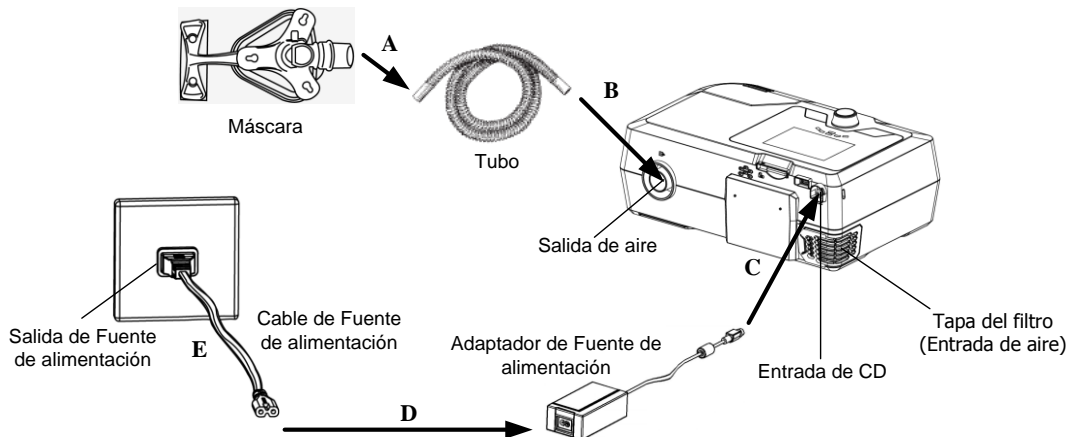


Manual de Funcionamiento del G2S A20 / G2S C20

1. Función de los Botones

-  Botón de Rampa: Presionar para activar la función de aumento
-  Botón de Silenciar: Presionar para silenciar la alarma
-  Botón de Mando: Inicia el tratamiento y ajusta la configuración del dispositivo


2. Configuración del Dispositivo




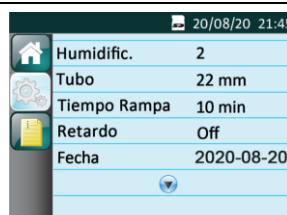
- A. Conectar un extremo del tubo a la mascarilla ya montada.
- B. Conectar el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo, tal como se muestra en la figura anterior.
- C. Conecte el adaptador de fuente de alimentación a la entrada DC del dispositivo principal.
- D. Conecte el cable de fuente de alimentación al adaptador de fuente de alimentación.
- E. Conecte el cable de fuente de alimentación a la toma de corriente.

3. Ajustar la Configuración del Dispositivo


- A. Después de que el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación, la pantalla muestra la interfaz principal que se muestra abajo en la figura de la izquierda.

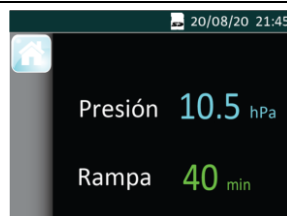


- B. Desde la interfaz principal que se muestra arriba, presione y mantenga presionado el **Botón de Rampa**  durante tres segundos. La pantalla muestra la interfaz de configuración inicial, como se muestra en la siguiente figura.




C. Presione **el Botón de Mando**  para acceder a la interfaz de configuración, como se muestra en la siguiente figura.

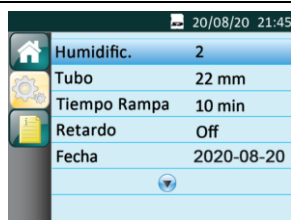

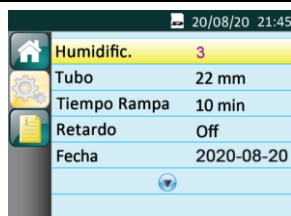


D. Presione y gire **el Botón de Mando**  para ajustar una opción.

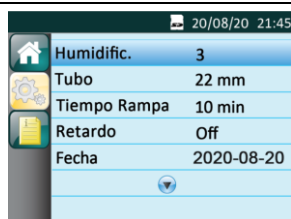


E. Presione **el Botón de Mando**  para confirmar su ajuste a la opción.



F. El cursor cambia entre las opciones a medida que se gira **el Botón de Mando**  Consulte los pasos C-E para ajustar otras opciones. Cuando el cursor esté sobre la opción de inicio, como se muestra en la figura a continuación, pulse **el Botón de Mando**  para salir de la interfaz de configuración.

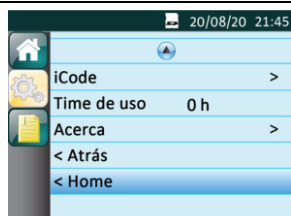

4. Iniciar el Tratamiento

Después de terminar de ajustar la configuración del dispositivo y volver a la interfaz principal, pulse **el Botón de Mando**  para iniciar el tratamiento.