



BMC | family cares

Sepid s.ä.

Como Iniciar Sesión en el Software

La medida de seguridad de inicio de sesión es para cumplir con los requisitos reglamentarios relacionados con la seguridad de los datos y la privacidad del paciente.

Cuenta:

- La cuenta de Windows* en la PC.
- Elija del cuadro desplegable.
- No está permitido usar la cuenta de invitados de Windows para iniciar sesión en el software, pruebe con la cuenta estándar o la de administrador.

Contraseña:

- La contraseña de tu cuenta de Windows.
- Si la cuenta de la PC no tiene contraseña dejar el espacio en blanco e iniciar sesión directamente.

*Solo compatible con Windows 7/8.1/10.



1. Click en Descarga de Datos.



Pacientes vistos recientemente

Nombre	Género	Edad	ID del paciente	Modelo de dispositivo	SN de Dispositivo	Modo de trabajo	Grupo de Pacientes	Tiempo de descarga	Tamaño de datos
1 nicolas	Masculino	28		BMC-680	1667J067	AutoCPAP	Temp	2021-10-06 15:43:07	30002 k

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Software de gestión de datos respiratorios

Archivo Vista Herramientas Descargar Ayuda

Nuevo Abrir Guardar Cerrar Descarga de datos Configuración del dispositivo Manejo del paciente Información del Paciente Reporte

Abrir

SD Equipo SDHC (G:) Buscar SDHC (G:)

Organizar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
18417112.USR	18/11/2021 03:28 ...	Archivo USR
20301076.USR	18/11/2021 03:39 ...	Archivo USR


Elija el archivo que termina en ".USR" que está en la memoria SD.

Nombre: DATA(*.USR) Abrir Cancelar

Pacientes vistos recientemente

Nombre	Género	Edad
--------	--------	------

Tempo de descarga Tamaño de datos



Descarga de datos

Información de datos

Ruta de archivo

SN de Dispositivo Modelo de dispositivo

Enlace del paciente

Introduzca el nombre, la identificación del paciente o serial del dispositivo para realizar la

Nombre	Gé...	Ed...	ID del pa...	Modelo d...	SN de Di...	Modo de ...	Grupo de ...	Tiempo de descarga	Tamaño ...
--------	-------	-------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------------	------------

Opciones de descarga

Rango de fechas del resumen de datos

Datos gráficos detallados

- 1) Puede crear un perfil de nuevo paciente.
- 2) Si ya creó uno, entonces, elija el perfil correcto que contenga los datos.
- 3) También puede elegir ningún paciente.

1. Escriba la información básica.

Software de gestión de datos respiratorios

Archivo Vista Herramientas Descargar Ayuda

Nuevo Abrir Guardar Cerrar Descarga de datos

Perfil del paciente

Información del Paciente Información clínica

Información básica

* Nombre

ID del paciente

Género Mas... Femeni...

* Fecha de nacimiento 01/01/1970

Edad 51

Altura (cm)

Peso (kg)

BMI

Grupo de Pacientes Default

Información del contacto

Dirección

Distrito

Ciudad

Provincia

Código postal

País

Número de teléfono

Correo electrónico

Información del médico

Médico

Departamento

Hospital/Clinica

Información del seguro

Aseguradora

Número de membresía del

Fecha de inicio 02/12/2021

* Campo requerido

Confirmar Cancelar

Pacientes vistos recientemente

Nombre	Género	Edad
--------	--------	------

Tamaño de datos

2. Confirme.

Descarga de datos

Información de datos

Ruta de archivo: G:\18417112.USR

SN de Dispositivo: 18417112 Modelo de dispositivo: 25T

Enlace del paciente

Vincular paciente existente **Paciente nuevo** No vincular ningún paciente

Introduzca el nombre, la identificación del paciente o serial del dispositivo para realizar la

18417112 Búsqueda

Nombre	Gé...	Ed...	ID del pa...	Modelo d...	SN de Di...	Modo de ...	Grupo de ...	Tiempo de descarga	Tamaño ...
1 nicolas	Ma...	51					Default		

Opciones de descarga

Rango de fechas del resumen de datos: Todos

Datos gráficos detallados: 7 días

Descargar solo **Descargar y ver** Descargar y generar informe

Cancelar

Descarga los datos rápidamente.

Puede ver los datos luego de haberlos descargado.

Si elije "Descargar y generar reporte", va a aparecer una pestaña donde se puede elegir el tipo de reporte que se quiere generar.

Pacientes vistos recientemente

Nombre Género Ed...

Software de gestión de datos respiratorios

Archivo Vista Herramientas Descargar Ayuda

Nuevo Abrir Guardar Cerrar Descarga de datos Configuración del dispositivo Manejo del paciente Información del paciente Reporte

Elegir el tipo de reporte que se quiere generar.

Reporte

Generación de reporte

Cumplimiento de uso Datos estadísticos Datos resumidos Datos detallados Todos los dispositivos

Fecha de inicio 20/09/2018

Fecha final 20/09/2018

Último 1 día

Seleccione fecha para gráficos detallados: 2018/09/20 Generar

Informe anterior


Nombre del archivo	Fecha de generación del ...
--------------------	-----------------------------

Vista

Pacientes vistos recientemente

Nombre	Género	Edad	ID del paciente
--------	--------	------	-----------------

de Pacientes Tiempo de descarga Tamaño de datos





Nombre del paciente: nicolas
ID del paciente:
Informe elaborado por:
Informe generado en: 2021/12/02

INFORME DE TRATAMIENTO

Perfil del paciente

Información básica

Nombre: nicolas

Género: Masculino Edad: 51 Fecha de nacimiento: 1970/01/01

Altura: 0.0cm Peso: 0.0kg IMC: 0.0 ID del paciente:

Información del contacto

Dirección:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Médico

Clínica / Hospital:

Médico:

Departamento:

En Resumen

1. Iniciar sesión con la cuenta de Windows de la PC
2. Haga click en Descarga de Datos.
3. Elija el archivo que termina en “.USR” que está en la memoria SD.
4. Puede crear un nuevo perfil o si ya tiene uno puede elegir ese directamente.
También se puede elegir ningún paciente.
5. Escriba la información básica y confirme.
6. Descargar: Descarga los datos rápidamente.
Descargar y ver: Puede ver los datos luego de haberlos descargado.
Descargar y generar reporte: Puede obtener el reporte adecuado directamente.
7. En la página previa del reporte: guarde el reporte cliqueando el icono de guardado.
También se puede seleccionar en el lado derecho.