



BMC | family cares

Sepid^{...}_{s.A.}



Guía rápida de uso del software Auto CPAP Mini M1 BMC




Como Iniciar Sesión en el Software

Descarga e instalación de la aplicación:

- Busque "BMC Mini" en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (Google Play Store para Android o Apple App Store para iOS) y descargue la aplicación gratuita




Conexión del dispositivo CPAP al móvil:

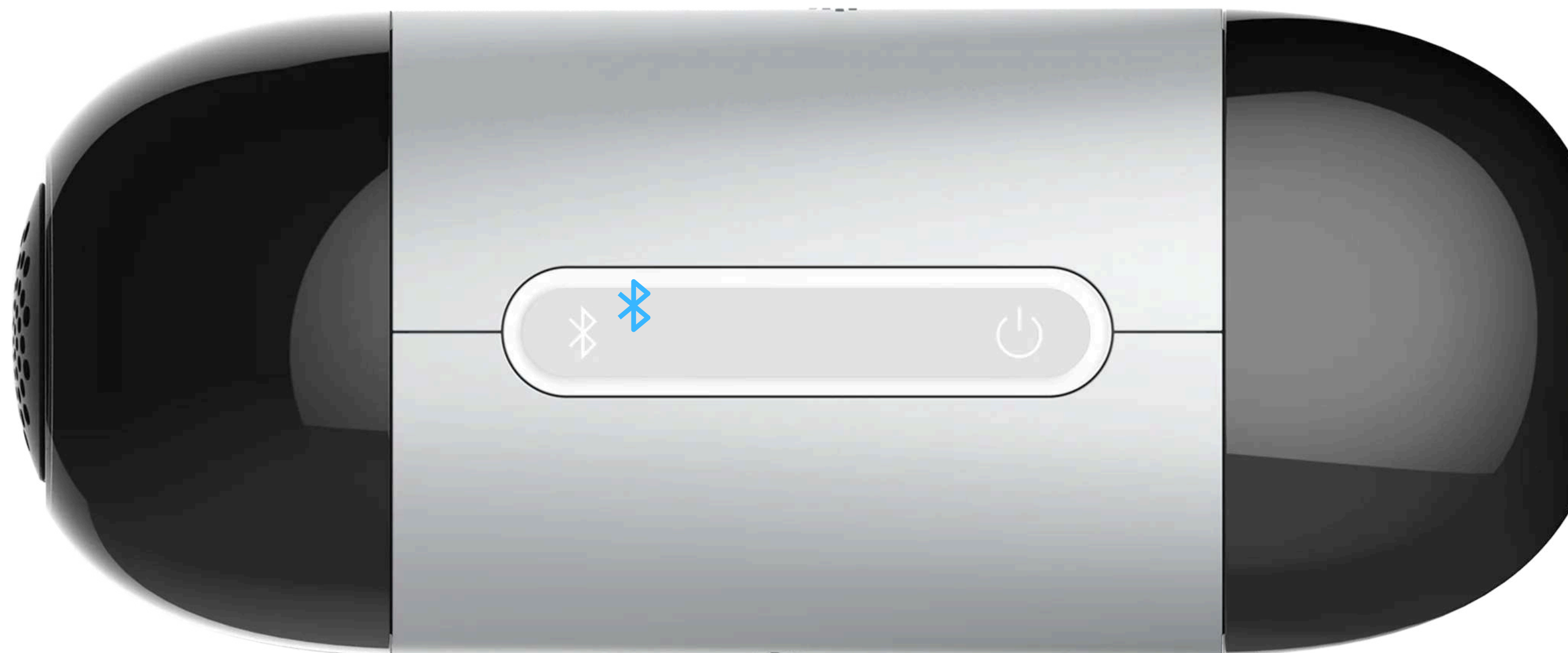


- Encienda el M1 Mini y presione el botón de Bluetooth en el dispositivo; la luz indicadora de Bluetooth comenzará a parpadear, indicando que está en modo de emparejamiento.
- Abra la aplicación BMC Mini en su móvil, toque el ícono de Bluetooth y seleccione su dispositivo M1 Mini de la lista para emparejarlo

- Configuración y control del dispositivo desde la aplicación:
- Una vez emparejado, desde la aplicación puede:
 - Encender y apagar el flujo de aire del CPAP.
 - Ajustar parámetros de tratamiento

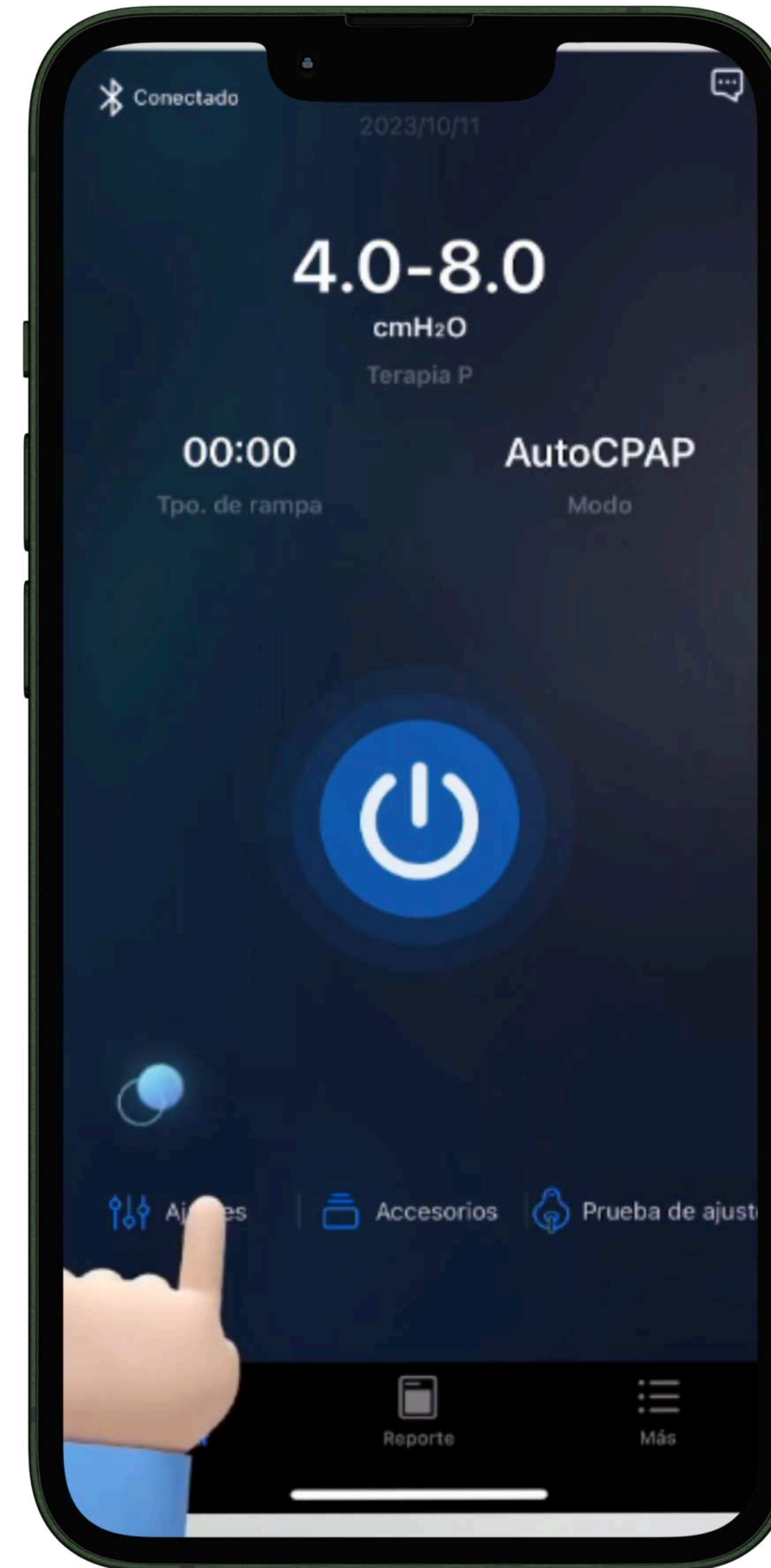

Ajustes de parámetros:

- Ajustar la presión y el tiempo de rampa.
- Ajustar tipo de máscara (buconasal, nasal y pillow).

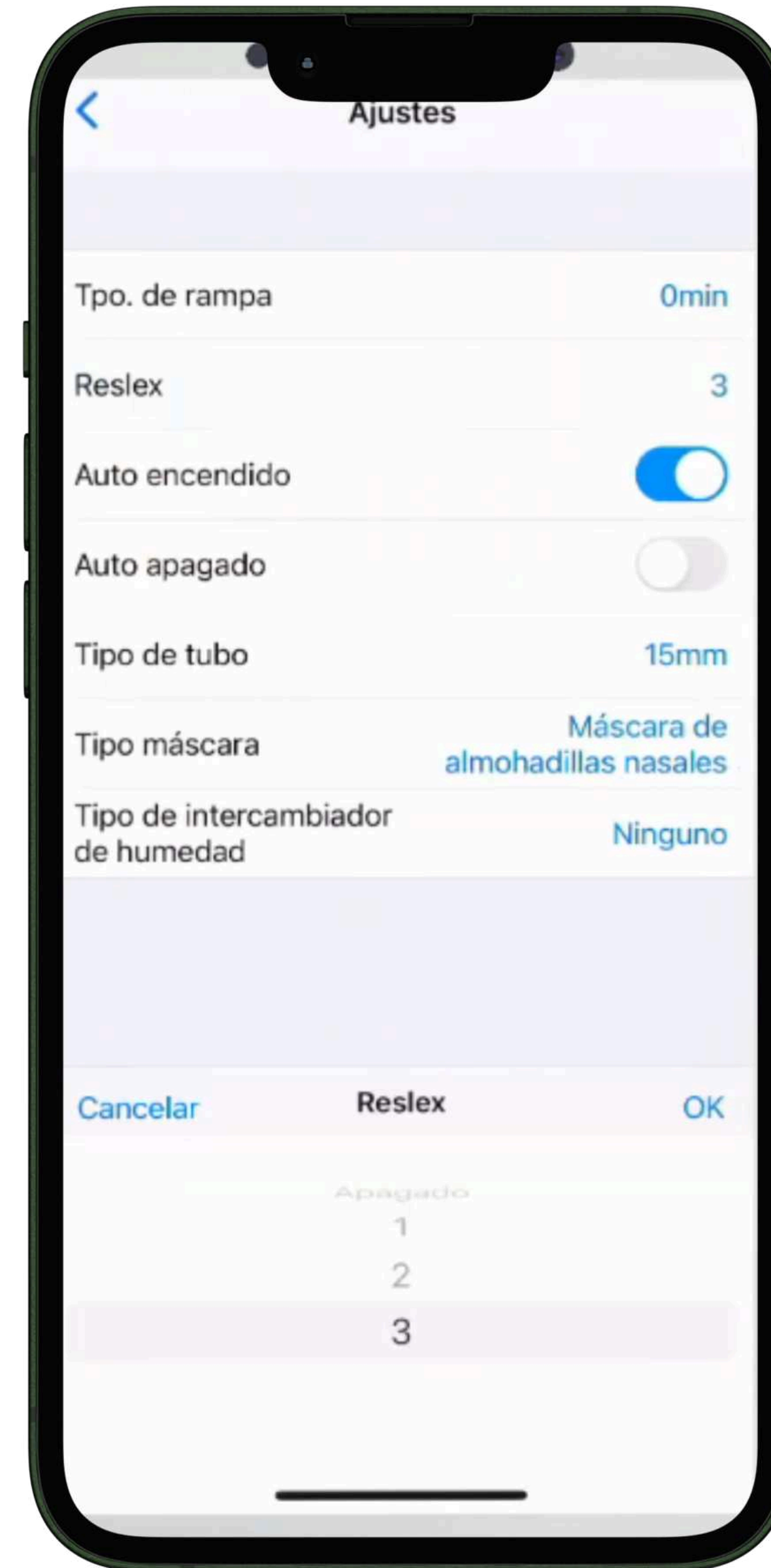


Ajustes de parámetros:

- Monitorear en tiempo real la presión de tratamiento y otros datos relevantes.



Prueba de ajuste

- Iniciar prueba, con "Prueba de ajuste"

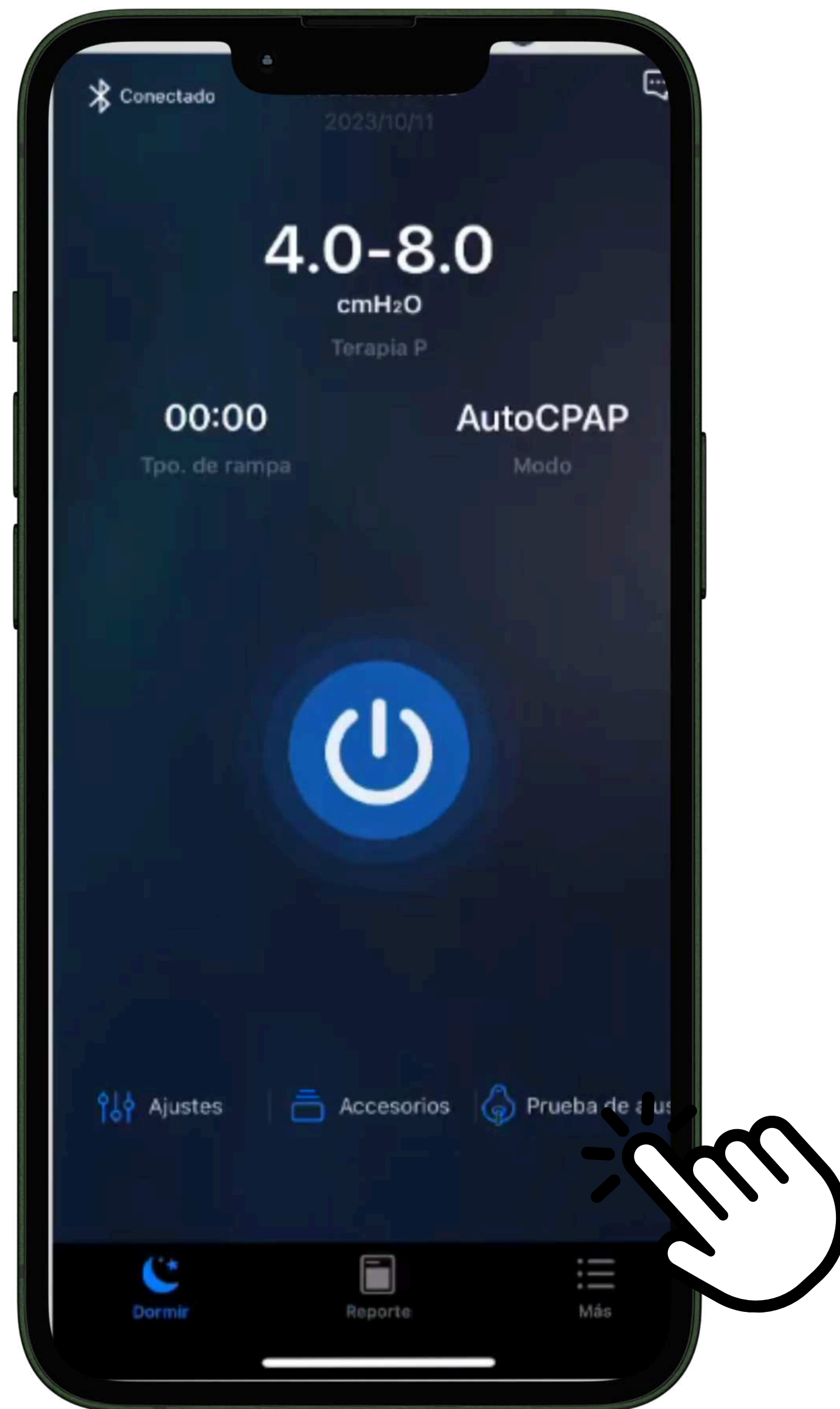

Sepid^{...}
s.A.

